

舌トレーニング用具

ペコぱんだ

舌の筋力アップで、
食生活を安全に楽しく

原寸大



ブルーぱんだ



ピンクぱんだ



ムラサキぱんだ



グリーンぱんだ



イエローぱんだ

硬さの違う
5種類をラインナップ

Orarize® 「オーライズ」は株式会社ジェイ・エム・エスが患者様の「口腔機能向上」を願って、「Oral(口腔)」と「Rise(向上)」を合わせて作成した造語で、口腔機能向上関連製品に使用する登録商標です。

JMS

人と医療のあいだに…

こんな症状はありませんか？

- ・食事中によくむせる
- ・食べ物がのどにつかえる感じがする



症状があり、
嚥下障害が認められる場合は
舌のトレーニングが必要です。

嚥下機能(食べ物を飲み込む働き)は、舌の運動機能と深く関係しています。
スムーズに食べ物を飲み込んで安全に食事ができるよう、舌の筋力を強化する必要があります。

ペコぱんだは、舌の筋力を強化するために開発された自主訓練用トレーニング用具です。

ペコぱんだの特長

硬さを選べる トレーニング部の硬さが5種類あり、患者さんの状態にきめ細かく合わせて選択できます。

ここからスタート

目標

維持

ブルーぱんだ
ピンクが
難しい方に。

ピンクぱんだ
舌の
トレーニングに
慣れましょう。

ムラサキぱんだ
筋力アップを
目指して次の硬さで
トレーニング
しましょう。

グリーンぱんだ
簡単に押しつぶせる
ようになるまで
がんばりましょう。

イエローぱんだ
今の舌の力を
維持しましょう。



極めて軟らかめ
弱



軟らかめ



やや軟らかめ




普通



硬め


舌筋力の強さ

強

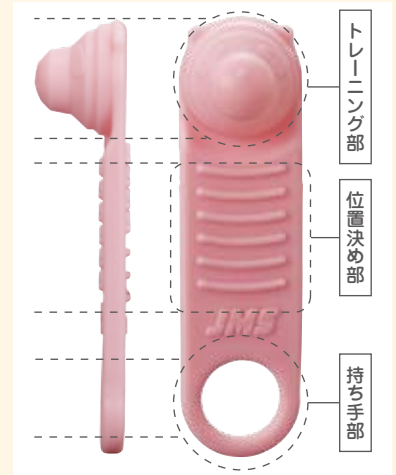


ペコぱんだの使用方法

1

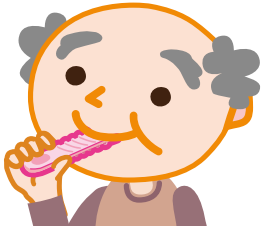


持ち手部の穴に指を入れて持ち、トレーニング部を舌の方に向けて口の中に入れます。

2

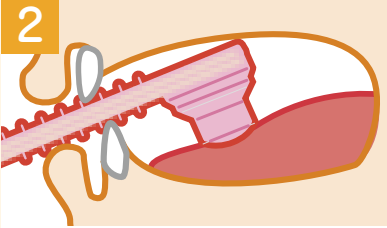

トレーニング部を舌の上に乗せ、位置決め部を前歯で軽く噛んで固定します。

3

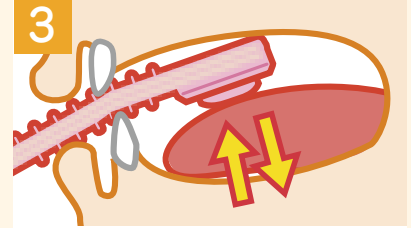

舌でトレーニング部を繰り返し押し上げ、押しつぶします。

● 単品

品名	品番	型式	規格	硬さ	JANコード
ペコぱんだ	JF-TTB	舌トレーニング用具 SS	ブルー	極めて軟らかめ	4987494262328
	JF-TTP	舌トレーニング用具 S	ピンク	軟らかめ	4987494068784
	JF-TTV	舌トレーニング用具 MS	バイオレット	やや軟らかめ	4987494249725
	JF-TTG	舌トレーニング用具 M	グリーン	普通	4987494068791
	JF-TTY	舌トレーニング用具 H	イエロー	硬め	4987494068807

梱包単位:10個×10箱=100個 非医療機器

● セット

品名	品番	型式	セット内容	JANコード
ペコぱんだ	JF-TTSET	舌トレーニング用具 基本セット	ピンク、バイオレット、グリーン	4987494263486



販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
■お問い合わせ先
カスタマーサポートセンター
TEL0120-200-517 csc@jms.cc



こちらよりペコぱんだに関する情報をご覧いただけます。
"お口の情報室"
<http://orarize.com>